

救急処置用

一般の名称(販売名) 線状パッド(止血パッドA・T)
製造販売届出番号 38B1X00001100001

止血パッド

Hemostasis Pad **滅菌加工** **滅菌済**

患部にパッドをあてて押さえて止血!!

いざという時に「止血パッド」

事故、災害、事件はいつ、どこで起こるかわかりません。そこで、いざという時に誰にでも簡単に止血処置ができる「止血パッド」が便利です。多くの方に緊急時の止血処置にお使いいただけます。

構造図

即効性のある**特殊三層構造**の止血パッドを開発しました。

三層構造とは?

第1層 吸水透過層

この層に血液を落とせば血餅と血清に分離し、血餅を残したまま血清は第2のクラスト層に届く。


第2層 クラスト層(分離層)

血清は血餅と分離拡散され血清は第3層に届く。

第3層 トラップ層

いち早く血清をゲル化させ戻らないようにする。

(イメージ図)

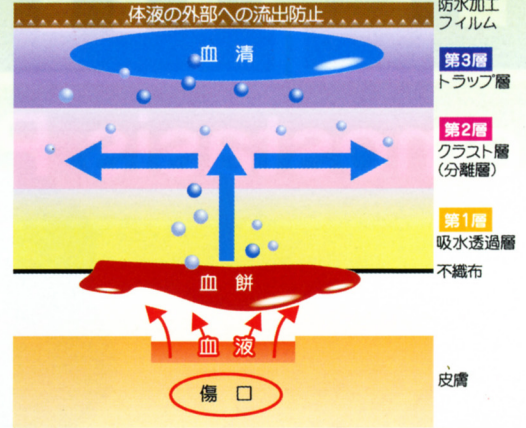


止血パッドの特長

■応急短時間止血

ガーゼに比べ迅速な止血が可能です。

■簡単止血

不織布面を止血部に当てて固定するだけ。いつでもどこでも、誰にでも簡単に使えます。

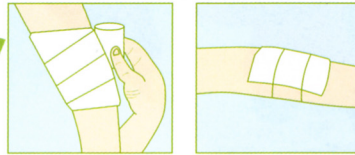

特長

■自然にやさしい安心製品

自然のバルブ綿を使用し、薬剤等を使用しないため副作用の不安もありません。また、出血が裏面へ到達しないため、精神的に安心感があります。(ショック死防止)

■2次感染防止

オレフィン系フィルムをバックシートとして採用しているため、負傷者の体液が介助者に接触することがなく2次感染の可能性を抑えることが可能です。

《使用上の注意》

●本品は止血用に作られていますが、傷の大きさや出血などによって止血ができない場合があります。早急に専門医の治療を受けて下さい。●本品は傷などを治すものではなく、一時的に出血を抑えるように作られています。本品を止血のためにお使いになりましたら、必ず専門医にご相談ください。●本品は使い捨てです。(再使用禁止)●滅菌パックに破損、汚損、水漏れなどがみられるものは、使用しないで下さい。●本品の使用期限の切れたものは、使用しないで下さい。●血液非凝固剤を服用されている人には、効果が見込まれない場合があります。

止血パッド製品一覧

《止血プロセット》



<セット内容>
・止血パッド(S・M・L:各1枚) ・ラポバンド:1本
・自着布帯:1本 ・手袋:6枚 ・マグネット付

《筒型ボックス》



<セット内容>
・止血パッド(S・M:各1枚) ・伸縮性テープ:2本
・手袋:4枚 ・マグネット付

設置事例



バックヤード



学校



社用車

企業の社会的責任

近年、企業はCSR【企業の社会的責任】の取り組みを強化しています。コンプライアンス【法令順守】や環境配慮が取り沙汰されていますが、AED【自動体外式除細動機】が、駅など公共スペース、大手企業などで設置が進められているのもCSRの一つです。我々はCSRにおける「身近な社会貢献」の一つとして、また、企業内における「オフィス、工場、様々な現場」での従業員に対する緊急時の対応設備としての活用を提案しています。