

命をつなぐキーチェーン

# E.R.V

Emergency Rescue Voice

## 心肺蘇生音声誘導器

2010年AHA  
ガイドライン準拠  
成人対応型



監修：国士舘大学大学院救急システム研究科教授 田中秀治先生

推薦：日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター長 益子邦洋先生  
千葉大学医学部附属病院 集中治療部教授 織田成人先生  
君津中央病院 救命救急センター 救急・集中治療科部長 北村伸哉先生  
(財)救命救命東京研修所教授 徳永尊彦先生  
協同研究：信州大学 医学部 人体構造学講座 助教 川岸久太郎先生  
国際医療福祉専門学校救急救命学科長 増茂誠二先生

# 「今、救命できるのはあなた...」

- スイッチを入れると 100～105 回/分のリズム音が鳴り心肺蘇生の手順が音声で流れます。
- リズム音 (100～105 回/分) に同期して押す位置が光ります。




- いつでもどこでも持ち運べるキーチェーンハンディ型。
- 救命講習を受講したけれど・・・忘れてしまった！そんな方の反復練習用として活躍します。



重量	23g
寸法	60.0×47.2×21.1mm
電池	LR44 ボタン電池 2 個使用
標準価格	¥1,000 (税別)



Pi Pi Pi Pi 

胸の真ん中を  
リズムに合わせて  
強くしっかり  
押しましょう。

## 命をつなぐキーチェーン E.R.V 内蔵音声一覧

- あなたの前で人が倒れていますね  
周りが安全な場所か確認して下さい。
- 肩を叩き反応があるか見てください。  
大丈夫ですかと声をかけてみて下さい。
- 反応がなかったら大声で人を呼び、  
119 番通報と AED を取りにいってもらいましょう。
- 胸やお腹に手を置いて、息をしているか確認しましょう。
- 息をしていなかったら臓物がとまっています。  
胸の真ん中に両手を重ねこのリズムに合わせて  
強く 30 回押しましょう。
- 胸の真ん中をリズムに合わせて強くしっかり押しましょう。  
リズムに合わせて強く押せていますか。
- 人工呼吸が出来る人は胸が軽くあがる程度 2 回吹き込みましょう。  
人工呼吸が出来ない人は続けて胸の真ん中をしっかりと押しましょう。
- 胸の真ん中をリズムに合わせて強くしっかり押しましょう。
- リズムに合わせて強く押せていますか。  
疲れてきたら交代しながら頑張ってください。
- 人工呼吸が出来る人は胸が軽くあがる程度 2 回吹き込みましょう。  
人工呼吸が出来ない人は続けて胸の真ん中をしっかりと押しましょう。
- 胸の真ん中をリズムに合わせて強くしっかり押しましょう。
- AED が到着したらスイッチを入れ AED の音声ガイダンスに従ってください。  
AED の装着中も胸の圧迫は中断しないで下さい。
- 救急車が到着しない場合でも諦めずしっかりと胸の真ん中を押し続けて下さい。

- 胸の真ん中をリズムに合わせて強くしっかり押しましょう。  
リズムに合わせて強く押せていますか。
- 人工呼吸が出来る人は胸が軽くあがる程度 2 回吹き込みましょう。  
人工呼吸が出来ない人は続けて胸の真ん中をしっかりと押しましょう。
- 胸の真ん中をリズムに合わせて強くしっかり押しましょう。
- リズムに合わせて強く押せていますか。  
疲れてきたら交代しながら頑張ってください。
- 人工呼吸が出来る人は胸が軽くあがる程度 2 回吹き込みましょう。  
人工呼吸が出来ない人は続けて胸の真ん中をしっかりと押しましょう。
- 胸の真ん中をリズムに合わせて強くしっかり押しましょう。
- AED が到着したらスイッチを入れ AED の音声ガイダンスに従ってください。  
AED の装着中も胸の圧迫は中断しないで下さい。
- 救急車が到着しない場合でも諦めずしっかりと胸の真ん中を押し続けて下さい。

※囲まれている部分は繰り返します。

人命救助活動にご協力頂き有難うございました。

※本カタログに掲載の仕様、形状、デザイン等は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

官公庁認定総合商社

株式会社 鈴盛商会

- お電話でのご注文 **03-3946-9631 (代)**
- FAX でのご注文 **03-3946-6773**
- メールでのご注文 [info@suzumori.co.jp](mailto:info@suzumori.co.jp)
- ホームページからは <http://www.suzumori.co.jp/>