

AsahiKASEI

適切な胸骨圧迫を目指して

# ZOLL® AED PLUS™

自動体外式除細動器



医療機器承認番号：  
22200BZIO0015000

ガイドライン  
2010対応


旭化成ゾールメディカル



## ●● 製品の特長


### 特長1 一体型電極パズ (CPR-D・padz)

CPRセンサを胸骨の下半分に置くことにより、パズ装着と胸骨圧迫部位の確認がスムーズにできます。

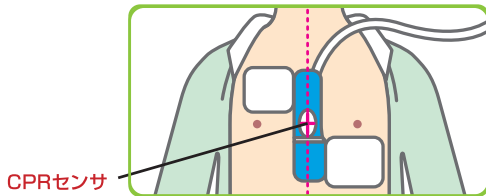

### 特長2 CPRフィードバック機能 (Real CPR Help機能)

胸骨圧迫の深さと速さを音声案内とメッセージ表示により、フィードバックすることで、適切な胸骨圧迫に誘導します。

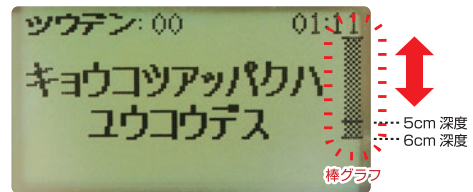

## ●● 製品仕様

自動体外式除細動器 AED Plus	
カタログ番号	1010-1136
付属品	リチウムバッテリー10本、除細動電極：CPR-D・padz、pedi・padz II (オプション品)、取扱説明書、オペレータガイド、『AED 消耗品交換時期』タグ、『次回交換』ラベル、プレート、ストラップ
波形	定電流二相式波形(RBW波形)
出力エネルギー	接続した除細動電極により自動選択 成人モード：120J、150J、200J 小児モード：50J、70J、85J
固体物体／液体の侵入に対する保護	IP 55 固体物体に対する保護IP5X(IEC60529) 液体に対する保護IPX5(IEC60529)
動作温度	0℃～50℃
保管温度	-30℃～60℃

※AED本体の保証期間は5年間(保証書に必要事項を記入・返送した場合)。

### ■小児等への適用

未就学児には小児用パズを使用してください。  
やむを得ない場合に限りCPR-D・padzに対応してください。その際は、

- CPRフィードバック機能は適用できません。
- 音声案内にかかわらず、胸の厚みの約1/3の胸骨圧迫を行ってください。
- CPR-D・padzの下部のパッドをCPRセンサ部から切り離し、片方を前胸部、もう片方を後背部へ貼って使用してください。

**AEDは救命処置のための医療機器です。**  
**AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。**

## ●● 消耗品



体表用除細動電極パズ  
CPR-D・padz

カタログ番号：8900-0815



小児用除細動電極パズ  
pedi・padz II

カタログ番号：8900-0810



リチウムバッテリー  
3V DC (123A型)

カタログ番号：0710-0510

- ※成人用パズ(CPR-D・padz)の有効期限は製造より66ヶ月です(5年間交換不要)。
- ※小児用パズ(pedi・padz II)の有効期限は製造より27ヶ月です。
- ※待機使用でバッテリー不足を生じた場合はバッテリーを5年間無償で提供します。
- ※電極パズは再使用禁止であり、使い捨てです。

AED設置者及び管理者は品質保証及び安全管理の為、以下の内容の確認をお願いいたします。

- 製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理すること。特に電極パズ、バッテリーの交換期限の確認及び、期限内の交換は確実に実施すること。
- 電極パズ、バッテリーには交換期限があるため、『AED消耗品交換時期』タグを本体またはソフトケース等の分かりやすい位置に貼っていること。
- AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時、廃棄時には、製造販売業者または販売店まで連絡すること。

一般的名称：非医療従事者向け自動除細動器  
販売名：ZOLL AED Plus 半自動除細動器  
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

【選任製造販売業者】

【ご利用は】

旭化成ゾールメディカル

0800-222-0889 (旭化成AEDコールセンター)

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル  
tel.03-6205-4544 fax.03-6205-4923

【外国特例承認取得者】

ZOLL Medical Corporation (アメリカ)

- ご使用前に取扱説明書および注意書きをよくお読みの上、正しくお使いください。
- 製品及び付属品にはラテックスを含む材料を使用していません。